

# KIERUNEK WŁÓKNA/ FIBRE DIRECTION



120 mm

## POLE TEKSTOWE/ TEXT BOX 99 mm x 229 mm

linia złożenia/  
folding line

1

Materiał/ Material:	ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:		
Wzór/Artwork:	<b>USTR-2326-800_1</b>		
Preparat/ Product:	<b>SUPEROPTIC HYDROBALANCE</b>		
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/Leaflet size: 120 x 240 mm ± 1 mm Format ulotki po złożeniu/Leaflet size after folding: 120 x 120 mm ± 0,5 mm Złożenie wykonuje drukarnia/Folding is made by printing house. Złożenie musi być zaprasowane/Folding should be ironed		
Czcionki/ Fonts:	Nazwa/Name: Panton 15 pt / 9 pt Tekst/Text: Times New Roman 9 pt		
Gramatura/ Weight:	40 g/m <sup>2</sup>	Farmakod/ Pharmacode:	105
Kolorystyka/ Colours:		P 2767 U	Opracował/ Prepared by: 27.02.2018 T. Parol



USTR-2326-800

## Инструкция за употреба



Polfa Warszawa S.A.

# СуперОптик® Хидробаланс

(натриев хиалуронат, 1 mg/ml разтвор)

Овлажняващи капки за очи, 2 x 5 ml, 1 x 5 ml



**ЗАБЕЛЕЖКА:** Тази инструкция за употреба съдържа информация за безопасен метод и условия за употреба на капките за очи.

Прочетете внимателно инструкцията и я запазете, тъй като може да се наложи да я прочетете отново.

### Състав

Натриев хиалуронат, натриев хлорид, борна киселина, натриев тетраборат, динатриев едетат, полихексанид (РНМВ), високопречистена вода.

### Показания за употреба

Капките за очи СуперОптик Хидробаланс имат ефикасно и дълготрайно овлажняващо въздействие. Те бързо облекчават усещането за сухота, дразнене, напрежение в окото и усещането за песъчници под клепачите. СуперОптик Хидробаланс е показан по-специално при следните случаи:

- излагане на очите на въздействието на дразнещи фактори на околната среда като прах, пушек, UV-лъчи, топлина (парно отопление, sauna), климатизи, вятър, козметика, хлорирана вода;
- намалена честота на мигане, причинена от гледане на телевизия, четене и при хора, при които се налага по-продължителна зрителна концентрация, включително такива, които работят пред монитор, шофират и т.н.;
- недостатъчно производство на сълзи или променен състав на сълзите, при лица със синдром на сухото око и при хора над 40-годишна възраст;
- при хора, носещи контактни лещи.

Капките за очи СуперОптик Хидробаланс може да се използват с всички видове контактни лещи.

**Стерилно – произведено при асептични условия.**



### Указания за употреба

Продукт, предназначен за самостоятелно приложение. Само за външна употреба.

Измийте ръцете си преди употреба. Капките за очи СуперОптик Хидробаланс трябва да се прилагат локално в конюнктивалния сак. Обичайната доза е 1 или 2 капки 3 до 5 пъти на ден. Не докосвайте върха на капкомера, тъй като това може да доведе до замърсяване на съдържането на опаковката.

Ако симптомите продължават или се влошават, докато използвате капките за очи, след като бъдат премахнати причините за дразненето, прекратете употребата на продукта и се свържете с лекар специалист.

### Противопоказания

Не използвайте капките за очи СуперОптик Хидробаланс, ако Ви е известно, че имате свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.



## Предпазни мерки

- Преди употреба проверете датата на изтичане на срока на годност, посочена върху опаковката. Не използвайте капките за очи след датата на изтичане на срока на годност (☒), посочена върху бутилката и картонената кутия. Капките за очи трябва да се използват до 8 седмици след първото отваряне на бутилката.
- Преди първата употреба се уверете, че опаковката е запечатана. Ако лентата около капачката е счупена, не използвайте продукта.
- Не прилагайте разтвора, ако е променил цвета си или е помътнял.
- Завивайте капачката пълно на бутилката след всяка употреба.
- Да се съхранява на място, далече от достъпа на деца.
- Ако едновременно се използват и други капки за очи, **СуперОптик Хидробаланс** трябва винаги да са последният използван препаратор и трябва да се спазва 5-минутен интервал след прилагането на предишното лечение.

## Специални предупреждения

- Не смесвайте и не разреждайте капките за очи **СуперОптик Хидробаланс** с други течности, тъй като това може да повлияе неблагоприятно на стерилеността и ефикасността на капките за очи.
- Лица, използващи контактни лещи, трябва да се свържат със специалист преди да използват офталмологични продукти.

## Възможни нежелани реакции

Продуктът се понася добре. При някои хора може да се появят зажеряване на конюнктивата, парене в очите или временно замъгливане на зрението. Ако се появи постоянен дискомфорт или дразнене, прекратете употребата на капките за очи и се консултирайте със специалист.

 Polfa Warszawa S.A.  
ul. Karolkowa 22/24  
01-207 Warszawa, Polska  
tel. +48 22 691 39 00  
[www.polfawar.com.pl](http://www.polfawar.com.pl)

**Възможни опаковки:** 2 x 5 ml, 1 x 5 ml  
Не всички размери опаковки се предлагат на пазара.

**Дата на актуализиране:** януари 2017 г.

 STERILE A

 0197

## Значение на използваните символи:

 STERILE A Стерилно

 Прочетете инструкцията за употреба.

 Използвайте преди: (дата на изтичане на срока на годност)

 Производител

 LOT Партиден номер

 +25°C Да се съхранява при температура под 25°C.