

KIERUNEK WŁÓKNA/ FIBRE DIRECTION



POLE TEKSTOWE/ TEXT BOX

120 mm x 390 mm

200 mm

linia złożenia/
folding line

Materiał/ Material:	ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:		
Wzór/Artwork:	UKSL-1564-800_1		
Preparat/ Product:	Xylogel Hydro 10 g		
Rozmiar ulotki/ Leaflet size	140 x 400 mm		
Adnotacje/ Annotations:	Złożenie wykonuje drukarnia. Złożenie musi być zaprasowane/ Folding is made by printing house. Folding should be ironed		
Czcionki/ Fonts:	Nazwa/Name: ----- Tekst/ Text: -----		
Gramatura/ Weight:	40 g/m ²	Farmakod/ Pharmacode:	201
Kolorystyka/ Colours:	■ Black	Opracował/ Prepared by:	09.02.2024 W.Streng

Как да използвате това медицинско изделие

Прочетете внимателно тази инструкция, преди да започнете да приемате това медицинско изделие, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Трябва да се посъветвате с лекар, ако не се чувствате по-добре или се почувстувате по-зле.

Ксилогел хидро

Гел за нос

Медицинско изделие

Какво съдържа тази инструкция:

1. Какво представлява Ксилогел хидро и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Ксилогел хидро
3. Как да използвате Ксилогел хидро
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Ксилогел хидро
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Ксилогел хидро и за какво се използва

Ксилогел хидро е медицинско изделие във формата на деликатен гел за нос, съдържащо комбинация от овлажняващи вещества. Ксилогел хидро предпазва лигавицата на носа от прекомерно изсушаване и премахва чувството на сухота и парене. Той възстановява правилната функция на носа и предпазва мукозната му мембрana от изсъхване, като с това спомага за лечение на инфекцията.

След прилагане Ксилогел хидро се разстила напълно върху вътрешната повърхност на носа, образуващи единороден защитен слой, който остава върху повърхността на мукозната мембрana, без да повлиява функцията на ресничестия ѝ апарат.

Поради гелообразната си формула, когато се приложи, Ксилогел хидро не се стича от носа или надолу в гърлото.

Ксилогел хидро има овлажняващ ефект и отстранява чувството за сухота на назалната мукозна мембрana, причинено от:

- инфекциозен сух ринит;
- много сух въздух в помещението, причинен от централно отопление или климатик;
- висока или ниска околнa температура;
- цигарен дим или други замърсители на въздуха;
- употреба на лекарства, които предизвикват сухота на лигавицата и увреждане на нейния епител.

Ксилогел хидро може да се използва, ако в носната кухина се образуват корички, които се отстраняват трудно.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Ксилогел хидро

Не използвайте Ксилогел хидро, ако имате алергия към някоя от съставките на това медицинско изделие.

Предупреждения и предпазни мерки

Ксилогел хидро съдържа бензалкониев хлорид като консервант – той може да има дразнещ ефект върху лигавицата на някои склонни към алергия лица.

Избягвайте контакт с очите.

Няма противопоказания за употребата на Ксилогел хидро по време на бременност и кърмене.

3. Как да използвате Ксилогел хидро

Следвайте указанията за употреба по-долу, за да бъдете сигурни, че използвате правилно Ксилогел хидро.

По хигиенни причини опаковката на медицинското изделие трябва да се използва само от едно лице.

Как се използва

Използвайте 2-4 пъти дневно, прилагайки 1-2 дози от гела във всяка ноздра.

Използвайте защитната капачка преди всяка употреба на медицинското изделие. Преди първото използване на нова бутилка, след отстраняване на капачката, натиснете диспенсера няколко пъти, докато се появи гелът.

Поставете накрайника в ноздрата.

Държайте бутилката в изправено положение, притиснете диспенсера, което ще доведе до прилагането на доза гел в ноздрата.

Не издухвайте носа си веднага след използването на гела.



Продължителността на лечението с Ксилогел хидро зависи от продължителността на заболяването, но не трябва да превишава 30 дни.

Ако медицинското изделие трябва да се използва при дете, обсъдете това с лекар.

Ако сте използвали повече Ксилогел хидро, отколкото трябва

Не използвайте дози, по-големи от препоръчаните.

Не са докладвани случаи на предозиране или отравяне с Ксилогел хидро..

4. Възможни нежелани реакции

Няма съобщения за странични ефекти след употребата на Ксилогел хидро.

Моля, уведомете производителя, ако се появят алергични реакции или други странични ефекти.

5. Как да съхранявате Ксилогел хидро

Съхранявайте в добре затворена бутилка във външната опаковка.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Съхранявайте при температура под 25°C. Да не се замразява.

Не използвайте Ксилогел хидро след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката. Датата на изтичане се отнася за последния ден на посочения месец.

Срок на годност на медицинското изделие след първо отваряне на бутилката – 12 седмици

6. Друга информация

Състав: глицерол; динатриев фосфат додекахидрат; хидрокситетилцелулоза; натриев хлорид;
натриев дихидрогенфосфат монохидрат; пречистена вода; динатриев едетат; разтвор наベンзалкониев хлорид.

Как изглежда Ксилогел хидро и съдържание на опаковката

Ксилогел хидро е безцветен до леко жълт прозрачен гел без мирис.

Опаковка: 15 ml полиетиленова (HDPE) бутилка, съдържаща 10 g гел, затворена с PE дозираща помпа с алуминиева капачка и диспенсер в картонена кутия.

 **Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.**
ul. Pelpińska 19, 83-200 Starogard Gdańsk, Полша

Дата на изготвяне на инструкцията: март 2024

