

FONIX®

Ear Pain

Medicinos priemonė




Pirmoji pagalba pasireiškus dažnoms ausų problemoms

Ausų problemos

Išorinio ausies kanalo – angos – struktūra yra tipinė, todėl, po maudynių susikaupus vandeniui, vystosi infekcija, kaupiasi ausų vaškas, išsausėja oda ar atsiranda svetimkūnių. Jei taip atsitinka dažnai, juntamas ausies diskomfortas, skausmas arba dirginimas, vystosi infekcija, pasireiškia alergija ar net klausos praradimas.

Fonix® Ear Pain yra medicinos priemonė, savo sudėtyje turinti augalinių aliejų, pasižymičių naudingų terapiniu poveikiu, mišinio, skirto ausiai apsaugoti nuo dažnų problemų ir jas palengvinti.

Fonix® Ear Pain padeda esant ausų skausmui, infekcijai, sudirgimui ir prisikaupus ausų vaško.

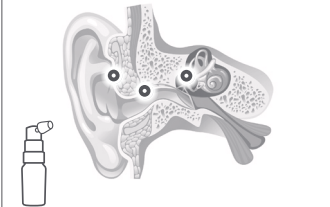

Sudėtis: alyvuogių aliejus, indinų sezamų aliejus, gulsčiųjų serenojų ekstraktas, fitosterolių kompleksas, bisabololis, kvapųjų murėjų lapų aliejus, cetoninių cinamonų lapų aliejus, vėgriųjų ekstraktas, mėtų aliejus.

Indikacijos:

Vartoti esant ausies dirginimui, infekcijai ar ausies skausmui, ausies užsikimšimo pojūčiui.

Išpėjimai:

- Nevartoti esant ausies būgnelio prakiurimui.
- Nevartoti į akis.
- Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Suaugusiems ir vyresniems kaip 3 metų vaikams.

TIK IŠORINIAM VARTOJIMUI

Vartojimas: purkšti po 1–2 įpurškimus į kiekvieną ausį 3 kartus per parą.

Laikymo sąlygos:

Laikyti vėsioje vietoje, ne aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.

Nenaudokite medicinos priemonės pasibaigus

galiojimo laikui, nurodytam ant buteliuko ir kartono dėžutės

Apie kiekvieną svarbų su medicinos priemone susijusį incidentą reikia pranešti gamintojui ir Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veikai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos:

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veikai tarnyba

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Medicinos priemonių priežiūros skyriui

A. Juozapavičiaus g. 9,

LT-09311 Vilnius

www.vaspvt.gov.lt



Gamintojas:

Naveh-Pharma LTD.

19, Yad-Harutzim St., Netanya, 4250519 Izraelis

www.navehpharma.com

EC REP

Igaliotasis atstovas Europos Bendrijoje:

OBELIS S.A. 53 Boulevard

Général Wahnis 1030 Brussels, Belgija

Importuotojas:

Pharmaceutical Works Polpharma S.A.

19, Pelplirška Str.,

83-200 Starogard Gdański, Lenkija

Informacija apie medicinos priemonę:

Farmacinės įmonės Polpharma S.A. atstovybė

E. Ožeškienės g. 18 A

LT- 44254 Kaunas

Tel. +370 37 325131

Ver. 4 – Paskutinės peržiūros data: 2021-06



Simbolių paaiškinimas:



Žiūrėti naudojimo instrukciją.



Naudoti iki:



Gamintojas

EC REP

Igaliotasis atstovas Europos Sąjungoje

LOT

Partijos numeris

MD

Medicinos priemonė

FONIX®

Ear Pain

Medicīniska ierīce




Pirmās palīdzības līdzeklis bieži sastopamu ar ausīm saistītu problēmu gadījumā

Ausu problēmas

Arējās auss kanāls ir atvere, kas tās tipiskās uzbūvēs dēļ ir pakļauta infekcijām, ko izraisa pēc atrašanās ūdenī ausī iekļuvašais ūdens, ausu sēra uzkrāšanās, ādas sausums un ausis iekļuvaši svešķermeņi. Šīs biežās parādības var radīt ausu diskomfortu, sāpes, niezi, infekcijas un alerģijas, pat izraisīt dzirdes zudumu.

Fonix® pret ausu sāpēm ir medicīniska ierīce, kas satur augu eļļu maisījumu, kuras pazīstamas ar savu labvēlīgo ārstniecisko iedarbību, un šo ierīci ir paredzēts lietot, lai nepieļautu un atvieglotu bieži sastopamās ausu problēmas.

Fonix® pret ausu sāpēm palīdz, ja ir sāpes, infekcija, kairinājums vai ausu sēra uzkrāšanās.

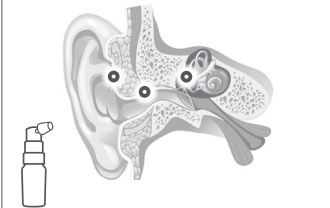

Sastāvdaļas: *Oleum europaea* (olīveļļa), *Sesamum indicum* (sezama) eļļa, zāgžobainās sabalpalmas ekstrakts, fitosterolu komplekss, bisabolols, *Murraya koenigii* (karija) lapu eļļa, *Cinnamomum zeylanicum* (kanēļkoka) lapu eļļa, korajū ekstrakts un krūzmētras eļļa.

Indikācijas

Lietošana pret ausu kairinājumu, infekcijām, sāpēm un aizlikuma sajūtu.

Uzmanību!

- Nelietot, ja ir plīsuši bungādiņa.
- Nesmidzināt acis.
- Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Pieaugušajiem un bērniem no 3 gadu vecuma.

TIKAI ĀRĪGAI LIETOŠANAI

Lietošana: pa 1–2 aerosola devām katrā ausī trīsreiz dienā.

Uzglabāšanas apstākļi

Uzglabāt vēsā vietā. Nepakļaut par 50°C augstākai temperatūrai.

Nelietot šo medicīnisko ierīci pēc derīguma termiņa , kas norādīts uz pudelītes un kartona kastītes.

Par katru ar ierīci saistītu nopietnu negadījumu ziņo ražotājam un Zāļu valsts aģentūrai:

Zāļu valsts aģentūra
Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālr. 67078424, 29447659
info@zva.gov.lv
Fax: (+371) 67078428
<https://www.zva.gov.lv>



Ražotājs:

Naveh-Pharma LTD.
19, Yad-Harutzim St., Netanya, 4250519 Izraēla
www.navehpharma.com



Plinvarotais pārstāvis EK:

OBELIS S.A. 53 Boulevard
Général Wahnis 1030 Brussels, Beļģija

Importētājs:

Pharmaceutical Works Polpharma S.A.
19, Pelplirška Str.
83-200 Starogard Gdański, Polija

Informācija par medicīnisko ierīci:

ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "POLPHARMA" SPÓŁKA AKCYJNA
filiale Latvijā

Mārupes nov., Tīraine, Pakalniņu iela 4 - 201, LV-2167
mob. tel. (+371) 27886851

4. versija – pēdējā pārskatīšana: 06.2021



Simbolu skaidrojums:



Izlasīt lietošanas pamācību.



Izlietot līdz: (derīguma termiņš)



Ražotājs



Plinvarotais pārstāvis Eiropas Savienībā



Sērijas numurs



Medicīniska ierīce

Material/ Material:	ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:		
Wzór/ Artwork:	ULT-006403_1		
Preparat/ Product:	Fonix Ear Pain		
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/ Leaflet size: 105 x 145 mm		
Czcionki/ Fonts:			
Gramatura/ Weight:	- g/m ²	Farmakod/ Pharmacode:	-
Kolorystyka/ Colours:	■ P Cool Gray 11	Opracował/ Prepared by:	15.09.2021 W.Terlicka