

KIERUNEK WŁÓKNA/
FIBRE DIRECTION



210 mm

POLE TEKSTOWE/
TEXT BOX
109 mm x 409 mm

linia złożenia/
folding line

1

Material/ Material:	ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:		
Wzór/ Artwork:	UHLR-0015-800_1		
Preparat/ Product:	Superoptic Complete		
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/Leaflet size: 130 x 420 mm ± 1 mm Format ulotki po złożeniu/Leaflet size after folding: 130 x 210 mm ± 0,5 mm Złożenie wykonuje drukarnia/Folding is made by printing house Złożenie musi być zaprasowane/Folding should be ironed		
Czcionki/ Fonts:	Nazwa/Name: Panton 15 pt / 9 pt Tekst/Text: Times New Roman 9 pt		
Gramatura/ Weight:	40 g/m ²	Farmakod/ Pharmacode:	100
Kolorystyka/ Colours:	■ P. 2767 U	Opracował/ Prepared by:	19.03.2020 W.Jeziorska

СуперОптік™ Компліт

краплі очні зволожуючі з натрієм гіалуронату
0.2 % та декспантенолом 2 %

Склад: 1 ml (мл) розчину містить:

натрію гіалуронат 0.2%, декспантенол 2%, натрію цитрат, дигідрат, кислота лимонна, моногідрат, вода високоочищена.

СуперОптік™ Компліт – стерильні зволожуючі очні краплі, що містять натрію гіалуронат та декспантенол, та не містять консервантів.

Натрію гіалуронат присутній в організмі людини, у тому числі в слюзній рідині (сльозі). Декспантенол – речовина групи вітаміну В, що підтримує функції натрію гіалуронату. Ці активні речовини швидко, інтенсивно та довготривало зволожують, підтримують процеси регенерації, захищають від навколишніх факторів та турботливо захищають поверхню ока.

СуперОптік™ Компліт приносить полегшення при таких симптомах, як:

- сухість;
- відчуття піску чи стороннього тіла в очах;
- втома;
- печіння;
- свербіж;
- слезотеча;
- подразнення;
- тимчасова розмитість зору, що виникає внаслідок перевтоми очей.

Краплі повертають природне зволоження слизової оболонки ока, захищають від пересихання та сприяють підтриманню очей у гарному стані.

Активні речовини крапель містять натрію гіалуронат – природно речовину, яка створює рівномірний, захисний шар тривалої дії на поверхні ока, захищає від подразнень та пересихання слизової оболонки очей. Цей шар не чинить несприятливого впливу на зір.

Комплекс складу крапель містить декспантенол (провітамін В₃), який підвищує зволожуючі властивості натрію гіалуронату, а також допомагає в регенерації та захисті поверхні ока.

СуперОптік™ Компліт зволожує, захищає та формує захисну плівку на поверхні очей, усуваючи дискомфорт пов'язаний із:


- механічним подразненням, наприклад, спричиненим носінням контактних лінз або після офтальмологічних обстежень;
- використанням косметики та внаслідок впливу подразнюючих факторів навколишнього середовища, таких як: кондиціоноване повітря, вітер, сухе, холодне, гаряче повітря, забруднене повітря (наприклад, смог, тютюновий дим), перебування у закритому приміщенні або на сонці;
- втомою в очах, у зв'язку із тривалою концентрацією зору після перегляду телевізора, читанням, роботою за комп'ютером або керуванням автотранспортом, використанням смартфону;
- зменшенням кількості або порушенням складу слізної рідини, включаючи синдром «сухого ока», а також вікові зміни у осіб старше 40 років.

СуперОптік™ Компліт можна застосовуватися під час носіння усіх видів контактних лінз.

Спосіб використання:

З гігієнічних причин краплі слід використовувати індивідуально.

- Перед застосуванням очних крапель слід ретельно вмити руки.
- Перед першим використанням зніміть кришку із флакону, переверніть дозатор пляшки донизу, а потім обережно натисніть на пляшку до появи першої краплі.
- Перед кожним використанням крапель знімайте ковпачок перед закапуванням крапель в око (очі).
- 1-2 краплі закапують у кон'юнктивальний мішок 3 рази на день або відповідно до рекомендацій лікаря-офтальмолога.
- Обережно закрийте очі для того, щоб краплі рівномірно розподілилися на поверхні ока (очей).
- Закрийте флакон кришкою.
- Слід уникати контакту кінчика крапельниці із поверхнею ока.

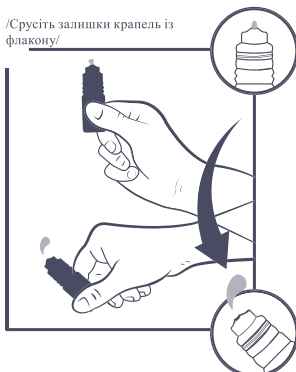

Перед закриттям флакону кришкою, струсіть залишки крапель із флакону, що залишилися після закапування.

Для видавлювання краплі із флакону, що майже використаний, слід сильніше натиснути на флакон. Це пов'язано із специфікою системи закриття, яка забезпечує стерильність та зберігає властивості крапель, що не містять консервантів.

СуперОптік™ Компліт не містить консервантів і тому добре переноситься, та може використовуватися довготривало.

Якщо симптоми подразнення зберігаються, незважаючи на застосування очних крапель, слід звернутися до лікаря-офтальмолога.

Протипоказання:

- підвищена чутливість до будь-якого із компонентів препарату;
- інфекційні захворювання ока (очей).

Міри перестороги:

Відсутні відомості щодо взаємодії СуперОптік™ Компліт з іншими очними краплями.

Якщо зволожуючі очні краплі призначені до застосування одночасно з іншими офтальмологічними препаратами, СуперОптік™ Компліт слід використовувати останнім, із 15-хвилинним інтервалом.

Після застосування крапель можливі мінущі розлади зору (помутніння зору, свербіж, печіння). Після використання СуперОптік™ Компліт слід утриматися від керування автомобілем та роботи з механізмами, що потребують підвищеної концентрації уваги та реакції, до повного відновлення зору.

Якщо розлади зору (помутніння зору, свербіння, печіння) зберігається або погіршуються, негайно повідомте свого лікаря-офтальмолога.
Не порушуйте цілісність системи закриття флакона до використання.

Побічні реакції:

СуперОптік™ Компліт не містить консервантів, тому добре переноситься. У вкрай поодиноких випадках можливий розвиток місцевих реакцій гіперчутливості, включаючи відчуття печіння, слезотечу, які зникають одразу після припинення застосування крапель.



Умови зберігання: флакон слід зберігати щільно закупореним у картонній коробці при температурі не вище 25 °С, у недоступному для дітей місці.

Строк придатності: 2 роки.

Використати протягом 90 днів після першого відкриття флакону.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

Форма випуску:

по 5 ml (мл) або по 10 ml (мл) у флаконі, що обладнаний спеціальним запірним клапаном і фільтром, для забезпечення захисту продукту від забруднення мікроорганізмами. По 1 флакону з інструкцією із застосування у картонній коробці.



Виробник:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Spolka Akcyjna ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa, Poland, Tel. + 48 22 691 39 00. Варшавський фармацевтичний завод «Польфа» АТ, вул. Каролькова 22/24, 01-207 Варшава, Польща, Тел. + 48 22 691 39 00.

Найменування та місцезнаходження уповноваженого представника

в Україні: ТОВ «ПОЛЬФАРМА ЮА», 04070, м. Київ, Україна, вул. Іллінська, будинок 8, вхід 11, 5 поверх.

Тел.: (044) 498-90-07, факс: (044) 498-93-87, e-mail: info.ukraine@polpharma.com

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 13.03.2020.



UA.TR.116

Позначення нанесені на пакуванні:



- Стерильно. Стерилізовано, використовуючи асептичні методи оброблення



- Перед використанням, ознайомтесь з інструкцію із застосування



- Код партії



- виготовлено (дата виготовлення)



- придатний до (дата закінчення строку придатності)



- зберігати при температурі не вище 25 °С



- виробник



- знак відповідності технічним регламентам

UA.TR.116

- ідентифікаційний номер органу з оцінки відповідності