

FONIX®

HIGIENA USZU




FONIX®

Higiena Uszu

Do usuwania woskowiny z uszu

Woskowina lub cerumen jest normalną wydzieliną gruczołów w uchu. Jednak nadmierne wydzielanie woskowiny może powodować szereg efektów niepożądanych takich, jak dyskomfort, ból i kaszel, z utratą słuchu włącznie.

Ubytek słuchu występuje, gdy w przewodzie słuchowym odłoży się zbyt duża ilość woskowiny (bloki). Wówczas zmniejsza się lub blokuje całkowicie poziom fal dźwiękowych, które docierają do błony bębenkowej.

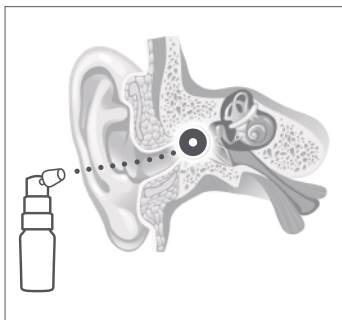

Dyskomfort lub ból mogą być odczuwane w przypadku zbyt dużego nacisku woskowiny na błonę bębenkową.

Kaszel może wystąpić, gdy zbyt duża ilość woskowiny pobudza nerwy wspólne kanału słuchowego i gardła, powodując łaskotanie w gardle, które może wywoływać kaszel.

Fonix® Higiena Uszu jest skutecznym, bezpiecznym i naturalnym sprayem przeznaczonym do rozpuszczenia i usuwania zgromadzonej woskowiny.

Fonix® Higiena Uszu łączy mechaniczne oczyszczanie z bezpieczeństwem i skutecznością naturalnej oliwy z oliwek. Podczas stosowania **Fonix® Higiena Uszu** woskowina rozpuszcza się i stopniowo jest usuwana z ucha dzięki naturalnym mechanizmom oczyszczania ucha.

Mechanizm rozpylania **Fonix® Higiena Uszu** zapewnia doskonałe rozproszenie w kanale słuchowym.

Skład: olej mineralny, Olivaxol™ (fitoskwalan), olejek miętowy.

Wskazania do stosowania:

Stosować w celu rozpuszczenia i usunięcia woskowiny zalegającej w przewodzie słuchowym. Przeznaczony dla niemowląt powyżej 3 miesiąca życia, dzieci oraz dorosłych.

Ostrzeżenia:

- Nie stosować w przypadku perforacji błony bębenkowej
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
- Nie stosować do oczu

Sposób użycia: Stosować

1-2 dawki 3 razy dziennie do każdego ucha aż do rozpuszczenia woskowiny. W trudnych przypadkach rozpylać wprost do kanału słuchowego pociągając górny płatek ucha lekko

w górę i w kierunku tyłu głowy.

Ten manewr umożliwia wnikanie składników czynnych do wewnętrznych części kanału słuchowego.

DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO

Warunki przechowywania:

Przechowywać w chłodnym miejscu. Nie narażać na działanie temperatury powyżej 50°C.

Postępowanie z pustym pojemnikiem:

Opakowania **Fonix® Higiena Uszu** nie wymagają szczególnej utylizacji. Nie ma konieczności specjalnego przechowywania, etykietowania lub niszczenia. Dbając o środowisko opakowania metalowe należy wyrzucać do przeznaczonych do tego pojemników.



Wytwórca:

Naveh-Pharma LTD.

19, Yad-Harutzim St., Netanya,
4250519 Izrael

www.navehpharma.com

EC REP

Autoryzowany przedstawiciel w EU:

OBELIS S.A. 53 Boulevard

Général Wahis 1030 Brussels, Belgium



Importer:


Zakłady Farmaceutyczne

Polpharma S.A.

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański, Polska



Material/ Material:	ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:		
Wzór/ Artwork:	ULT-004553_1		
Preparat/ Product:	Fonix Higiena Uszu		
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/ Leaflet size: 105 x 145 mm		
Czcionki/ Fonts:			
Gramatura/ Weight:	- g/m ²	Farmakod/ Pharmacode:	-
Kolorystyka/ Colours:	 P Cool Gray 11	Opracował/ Prepared by:	12.12.2019 W.Terlicka