

Material/ Material:	UŁOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:		
Wzór/ Artwork:	UNCH-1265-000_1		
Preparat/ Product:	HIPERNEBU		
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/ Leaflet size: 120 x 120 mm		
Czcionki/ Fonts:	Nazwa/Name: Panton 15 pt Tekst/ Text: Times New Roman 7,5 pt		
Gramatura/ Weight:	40 g/m ²	Farmakod/ Pharmacode:	—
Kolorystyka/ Colours:	 Pantone 2767 U	Opracował/ Prepared by:	22.10.2018 W.Jeziorska



Instrukcja używania wyrobu medycznego

Należy przeczytać uważnie całą instrukcję przed zastosowaniem wyrobu medycznego, ponieważ zawiera ona ważne informacje.

Należy zachować tę instrukcję, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli objawy nie ustąpią lub nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem.

 **polpharma**
HIPERNEBU

Wyrób medyczny

3% NaCl

Roztwór do inhalacji

Spis treści:

1. Co to jest wyrób medyczny **HIPERNEBU** i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem wyrobu medycznego **HIPERNEBU**
3. Jak stosować wyrób medyczny **HIPERNEBU**
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać wyrób medyczny **HIPERNEBU**
6. Inne informacje

1. Co to jest wyrób medyczny **HIPERNEBU** i w jakim celu się go stosuje

HIPERNEBU to roztwór do inhalacji wspomagający proces samooczyszczania się górnych i dolnych dróg oddechowych. Dzięki hipertonicznemu stężeniu chlorku sodu roztwór działa obkurczająco na śluzówkę, pozwalając na łatwiejsze usunięcie wydzieliny na zewnątrz. Można pomocniczo stosować w przypadkach ostrego zapalenia oskrzeli, zapalenia oskrzelików, mukowiscydozy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Dodatkowo preparat nawilża błonę śluzową ułatwiając oddychanie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem wyrobu medycznego **HIPERNEBU**

Nie należy stosować wyrobu w przypadku nadwrażliwości na chlorek sodu. W przypadku skłonności pacjenta do duszności przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem. Ampułka jednorazowego użytku. Wyrób medyczny nie jest przeznaczony do iniekcji.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ampułka powinna zostać zużyta po otwarciu. W przypadku stosowania innych leków przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem.

3. Jak stosować wyrób medyczny **HIPERNEBU**

Sposób użycia

Jedna ampułka (5 ml) służy do przeprowadzenia jednorazowej inhalacji. Inhalacje należy przeprowadzać 2-4 razy dziennie lub według wskazań lekarza. Ampułki można stosować do



każdego rodzaju inhalatora. W celu poprawnego użycia roztworu z inhalatorem należy stosować się do instrukcji obsługi urządzenia.

Wyrób nie powinien być stosowany dłużej niż 30 dni. Po tym czasie należy zrobić kilkudniową przerwę.

4. Możliwe działania niepożądane

Działania niepożądane nie występują w przypadku prawidłowego stosowania zgodnie z instrukcją użycia. W razie wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznych lub innych objawów niepożądanych należy poinformować o nich wytwórcę.

5. Jak przechowywać wyrób HIPERNEBU

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w suchym miejscu.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować wyrobu medycznego **HIPERNEBU** po upływie terminu ważności (📅) zamieszczonego na ampulce i tekturowym pudełku. Ampułka powinna zostać zużyta po otwarciu. Nie należy używać roztworu ponownie.

6. Inne informacje

Sterylna ampulka jednorazowego użytku.

Skład

Chlorek sodu, woda do iniekcji.

Hipertoniczny roztwór NaCl do inhalacji.

Opakowanie: 30 ampulek po 5 ml w tekturowym pudełku.



Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański, Polska
www.polpharma.com

Data opracowania instrukcji: październik 2018 r.



Znaczenie zastosowanych symboli:



Produkt sterylny



Należy zapoznać się z instrukcją używania



Użyć do: (termin ważności)



Wytwórca



Numer serii



Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C



Nie używać powtórnie