

Material/ Material:	UŁOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:		
Wzór/ Artwork:	USTR-2314-000_1		
Preparat/ Product:	HIALNEBU		
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/ Leaflet size: 120 x 120 mm		
Czcionki/ Fonts:	Nazwa/Name: Panton bold 15 pt Tekst/ Text: Times New Roman 7,5 pt		
Gramatura/ Weight:	40 g/m ²	Farmakod/ Pharmacode:	XXX
Kolorystyka/ Colours:	 Pantone 2767 U	Opracował/ Prepared by:	19.10.2018 W.Jeziorska



Instrukcja używania wyrobu medycznego

Należy przeczytać uważnie całą instrukcję przed zastosowaniem wyrobu medycznego, ponieważ zawiera ona ważne informacje.

Należy zachować tę instrukcję, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli objawy nie ustąpią lub nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem.



Wyrób medyczny

Hialuronian sodu

0,1 % roztwór do inhalacji

Spis treści:

1. Co to jest wyrób medyczny **HIALNEBU** i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem wyrobu medycznego **HIALNEBU**
3. Jak stosować wyrób medyczny **HIALNEBU**
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać wyrób medyczny **HIALNEBU**
6. Inne informacje

1. Co to jest wyrób medyczny **HIALNEBU** i w jakim celu się go stosuje

HIALNEBU to izotoniczny roztwór z hialuronianem sodu przeznaczony do inhalacji. Preparat nawilża górne i dolne drogi oddechowe ułatwiając usuwanie zalegającej wydzieliny. Dzięki zawartości hialuronianu sodu zapewnia wysoki poziom nawilżenia, chroniąc śluzówkę przed wysychaniem i wspomagając jej regenerację. Regularne stosowanie **HIALNEBU** chroni błonę śluzową przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, takich jak suche powietrze, zanieczyszczenia, niska lub wysoka temperatura.

Produkt można stosować również do zakraplania i przemywania jam nosowych. Preparat jest łagodny i bezpieczny, dlatego może być stosowany u niemowląt, dzieci i dorosłych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem wyrobu medycznego **HIALNEBU**

Nie należy stosować wyrobu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik wyrobu. Ampułka jednorazowego użytku. Wyrób medyczny nie jest przeznaczony do iniekcji.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ampułka powinna zostać zużyta po otwarciu. W przypadku stosowania innych leków przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem.

3. Jak stosować wyrób medyczny **HIALNEBU**

Sposób użycia

Inhalacje

Jedna ampułka (5 ml) służy do przeprowadzenia jednorazowej inhalacji. Inhalację przeprowadzać





USTR-2314-000

2-4 razy dziennie lub według wskazań lekarza. Ampułki można stosować z większością rodzajów inhalatorów, gdzie nie ma wyłączenia stosowania preparatów zawierających hialuronian sodu. W celu poprawnego użycia roztworu z inhalatorem należy stosować się do instrukcji obsługi urządzenia.

Zakraplanie i przemywanie

Preparat zakraplać 1-4 razy dziennie po kilka kropli do każdego otworu nosowego. W celu przemycia brzegów otworów nosa delikatnie czyścić je za pomocą nasączonego wacika kosmetycznego. Każda ampłka służy do jednorazowego użycia.

Wyrób nie powinien być stosowany dłużej niż 30 dni. Po tym czasie należy zrobić kilkudniową przerwę.

4. Możliwe działania niepożądane

Działania niepożądane nie występują w przypadku prawidłowego stosowania zgodnie z instrukcją użycia. W razie wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznych lub innych objawów niepożądanych należy poinformować o nich wytwórcę.

5. Jak przechowywać wyrób HIALNEBU

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w suchym miejscu. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować wyrobu medycznego HIALNEBU po upływie terminu ważności () zamieszczonego na ampułce i tekturowym pudełku. Ampłka powinna zostać zużyta po otwarciu. Nie należy używać roztworu ponownie.

6. Inne informacje

Sterylnie ampułki jednorazowego użytku.

Skład

hialuronian sodu, chlorek sodu, woda wysokococzyszczona.

Opakowanie: 30 ampulek po 5 ml w tekturowym pudełku.



Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański, Polska
www.polpharma.com

Data opracowania instrukcji: październik 2018 r.



1434



Znaczenie zastosowanych symboli:



Produkt sterylny



Należy zapoznać się z instrukcją używania



Użyć do: (termin ważności)



Wytwórca



Numer serii



Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C



Nie używać powtórnie

