

Material/ Material:	ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:		
Wzór/ Artwork:	ULT-008772_4		
Preparat/ Product:	HELP4SKIN Gojenie Ran 50 g		
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/ Leaflet size: 135 x 290 mm		
Czcionki/ Fonts:	Nazwa/Name: - Tekst/ Text: Arial 8 pt		
Kolorystyka/ Colours:	■ BLACK	Opracował/ Prepared by:	26.03.2024 M.Małodzińska-Lamek

help 4 skin

GOJENIE RAN

Hydrożel przyspieszający gojenie



WSPOMAGA LECZENIE RAN I OPARZEŃ

Bez parabenów

Bez antybiotyków

SKÓRA

Skóra jest największym organem w ludzkim ciele i zapewnia codzienną ochronę przed szkodliwymi czynnikami. Jeżeli ulegnie uszkodzeniu stajemy się bardziej podatni na infekcje i stany zapalne. Choć w większości przypadków nasze ciało może samo regenerować skórę, to właściwa pielęgnacja oparzeń i ran jest niezbędna dla zapobiegania komplikacjom towarzyszącym procesom ich gojenia i zablźniania.

Ciało reaguje na rany tworząc strup, który pokrywa uszkodzoną skórę i tworzy barierę przeciwko mikroorganizmom. Powoduje to spowolnienie procesu gojenia i znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia blizn, ponieważ strup musi być zerwany, w momencie tworzenia się nowej warstwy skóry. Dlatego ważne jest, poza dezynfekcją, utrzymanie wilgoci rany podczas gojenia. Ponadto, wiele ran (takich jak oparzenia) początkowo wysycha, a następnie uwalnia wilgoć. Dlatego, "inteligentny hydrożel" **Help4skin Gojenie ran** jest stosowany: zabezpiecza ranę przed wysychaniem przez uwalnianie wilgoci, ale jednocześnie absorbuje wilgoć, gdy stają się zbyt wilgotne. Tylko idealna wilgotność rany zapobiega tworzeniu się strupów i pęknięć skóry, zapewnia optymalną regenerację skóry i zapobiega powstawaniu blizn. Dodatkowo **Help4Skin Gojenie ran** natychmiast chłodzi i koi oparzone miejsce, dzięki wybranym substancjom pomocniczym podtrzymującymi aktywność hydrożelu ("Actipientia").

Help4Skin Gojenie ran to hydrożel, bez parabenów, o udowodnionej skuteczności.

- Natychmiast zmniejsza ból
- Zmniejsza ryzyko powstania blizn
- Przyspiesza gojenie
- Pomaga uniknąć infekcji
- Tworzy ochronną barierę
- Chłodzi
- Nie szczypie

SKŁAD

Help4skin GOJENIE RAN to "inteligentny" hydrożel, który reguluje wilgotność rany pod opatrunkiem.

Zawiera kwasowy karbomer stabilizowany karnozyną (podstawowy peptyd występujący naturalnie w skórze), który pomaga utrzymać infekcję pod kontrolą.

Do stosowania w suchych i wilgotnych ranach, takich jak:

- Drobne rany
- Zadrapania
- Oparzenia
- Skaleczenia
- Otarcia i pęknięcia skóry

Można stosować u dzieci powyżej 2 lat.

SKŁAD

Kwaśny koloidalny karbomer, L-karnozyna, woda, etyloheksanian cetearylu, heptanian stearylu, benzoesan sodu, sorbinian potasu.

SPOSÓB UŻYCIA

Dokładnie umyć ręce przed i po opatrzeniu rany.

Drobne rany:

- oczyścić i zdezynfekować ranę,
- jeżeli konieczne, osuszyć sterylną gazą
- raz lub dwa razy dziennie nakładać preparat na ranę, nie dotykając jej końcówką aplikatora. Nie wcierać żelu
- w razie potrzeby założyć bandaż lub plaster. Należy użyć nowego opatrunku za każdym razem

Powierzchniowe oparzenia:

- natychmiast po wystąpieniu oparzenia należy schładzać jego miejsce pod letnią bieżącą wodą przez 20 minut. Należy to zrobić jak najszybciej, gdyż korzystny efekt schładzania po 30 minutach zanika. Aby uniknąć nadmiernego wychłodzenia nie zaleca się stosowania zbyt zimnej wody.
- raz lub dwa razy dziennie nakładać preparat na ranę, nie dotykając jej końcówką aplikatora. Nie wcierać żelu
- założyć bandaż lub plaster i używać nowego opatrunku za każdym razem

Oparzenia słoneczne i podrażnienia skóry po ekspozycji na słońce

- oczyścić leczony obszar
- raz lub dwa razy dziennie nakładać preparat na ranę, nie dotykając jej końcówką aplikatora. Nie wcierać żelu
- w razie potrzeby założyć bandaż lub plaster. Należy użyć nowego opatrunku za każdym razem

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie używać w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników. W bardzo rzadkich przypadkach zgłaszano wystąpienie podrażnienia skóry. W przypadku wystąpienia podrażnienia lub reakcji alergicznej należy natychmiast przerwać stosowanie.

Help4Skin Gojenie ran nie należy stosować na duże otarcia (większe niż 20 cm²).

Help4Skin Gojenie ran może być stosowany na powierzchniowe oparzenia naskórka i/lub skóry właściwej, zwykle charakteryzujące się obrzękiem, zaczerwienioną skórą i pęcherzami.

Nie stosować **Help4Skin Gojenie ran** na twarz, oczy, powieki oraz błony śluzowe.

Należy zawsze zasięgnąć porady lekarza:

- w przypadku dużych, obszernych lub bardzo głębokich ran,
- w przypadku małych, silnie zakażonych ran
- w przypadku wolnego gojenia się rany lub ryzyka powikłań.

W takich przypadkach **Help4Skin Gojenie ran** może być pomocny, ale nie może być jedynym sposobem leczenia.

Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności (podanego na opakowaniu).

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze między 5°C a 25°C. Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ostatnia modyfikacja treści informacyjnej: marzec 2019.

50 g



OYSTERSHELL NV
NIJVERHEIDSWEG 10
9820 MERELBEKE BELGIA



Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
ul. Pełplińska 19
83-200 Starogard Gdański
Polska

 1639

OPIS SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA OPAKOWANIU:



Limit temperatury



Należy zapoznać się z instrukcjami użycia



Uwaga



Numer serii



Data przydatności



Wytwórca



SGS BE: 1639 Europejska procedura oceny zgodności wyrobów medycznych

1574/620152/19C/07020754/0