

Material/ Material:	ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:		
Wzór/ Artwork:	ULT-010133_3		
Preparat/ Product:	HELP4SKIN GOJENIE OPARZEŃ 75 g		
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/Leaflet size: 135 x 420 mm		
Czcionki/ Fonts:	Nazwa/Name: - Tekst/Text: -		
Gramatura/ Weight:	-	Farmakod/ Pharmacode:	-
Kolorystyka/ Colours:	 Black	Opracował/ Prepared by:	05.05.2025 A.Borucka

Instrukcja używania

help 4 skin

GOJENIE OPARZEŃ

Żel hydrokoloidowy przyspieszający gojenie



WSPOMAGA LECZENIE OPARZEŃ, WSPOMAGA LECZENIE RAN

SKÓRA

Skóra jest największym organem w ludzkim ciele i zapewnia codzienną ochronę przed szkodliwymi czynnikami. Jeżeli ulegnie uszkodzeniu stajemy się bardziej podatni na infekcje i stany zapalne. Chociaż w większości przypadków nasze ciało może samo regenerować skórę, to właściwa pielęgnacja oparzeń i ran jest niezbędna dla zapobiegania komplikacjom towarzyszącym procesom ich gojenia i zablizniania.

Ciało reaguje na rany tworząc strup, który pokrywa uszkodzoną skórę i tworzy barierę przeciwko mikroorganizmom. Powoduje to spowolnienie procesu gojenia i znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia blizn, ponieważ strup musi być zerwany, w momencie tworzenia się nowej warstwy skóry. Dlatego ważne jest, poza dezynfekcją, utrzymanie wilgoci rany podczas gojenia. Ponadto, wiele ran (takich jak oparzenia) początkowo wysycha, a następnie uwalnia wilgoć. **Help4Skin Gojenie oparzeń** jest inteligentnym hydrożelem, który reguluje poziom wilgotności rany. Nie tylko zabezpiecza ją przed wysychaniem lecz także absorbuje wilgoć, gdy staje się zbyt wilgotna. **Help4Skin Gojenie oparzeń** natychmiast chłodzi i koi oparzone miejsce, dzięki wybranym substancjom pomocniczym podtrzymującymi aktywność hydrożelu ("Actipientia").

WSKAZANIA

- Oparzenia
- Oparzenia słoneczne
- Otarcia i pęknięcia skóry
- Rany

Można stosować u dzieci powyżej 2 lat.

SPOSÓB DZIAŁANIA

Help4Skin Gojenie oparzeń to hydrokoloidowy żel o udowodnionej skuteczności.

Zawiera kwasowy karbomer stabilizowany karbonyzyna, podstawowym peptydem występującym naturalnie w skórze. W przypadku ran suchych, tj. otarcia lub rany chirurgiczne, ma działanie okluzyjne: hamuje odparowywanie wilgoci i zmniejsza utratę płynu przez naskórek. Karbonyzyna buforuje kwaśne polimery, działa również jako przeciwutleniacz. Karbomer pochłania nadmiar płynu z wilgotnych, sączących się ran oraz schładza i zmiękcza miejsce kontaktu z plasterem i/lub bandażem. Nie przywiera do rany. Tworzy barierę ochronną.

SKŁAD

kwaśny koloidalny karbomer, karbonyzyna, woda, benzoesan sodu, sorbinian potasu.

SPOSÓB UŻYCIA

Dokładnie umyć ręce przed i po użyciu preparatu **Help4Skin Gojenie oparzeń** na ranę.

Powierzchniowe oparzenia:

- **natychmiast** po wystąpieniu oparzenia należy schładzać jego miejsce pod letnią bieżącą wodą przez 20 minut. Należy to zrobić jak najszybciej, gdyż korzystny efekt schładzania oparzonego miejsca zmniejsza się z upływem czasu, a po 30 minutach całkowicie zanika. Aby zapobiec hipotermii nie zaleca się stosowania zimnej wody.
- raz lub dwa razy dziennie aplikować cienką warstwę preparatu **Help4Skin Gojenie oparzeń** na ranę nie dotykając rany dozownikiem. Nie wcierać żelu.
- zastosować opatrunek. Za każdym razem stosować nowy opatrunek.

Oparzenia słoneczne:

- oczyścić oparzone miejsce,
- raz lub dwa razy dziennie aplikować cienką warstwę preparatu **Help4Skin Gojenie oparzeń** na ranę nie dotykając jej dozownikiem. Nie wcierać żelu.
- jeśli to konieczne stosować opatrunek. Za każdym razem stosować nowy opatrunek.

Drobne rany:

- oczyścić i zdezynfekować ranę,
- jeśli to konieczne ostrożnie osuszyć sterylną gazą,
- raz lub dwa razy dziennie aplikować cienką warstwę preparatu **Help4Skin Gojenie oparzeń** na ranę nie dotykając jej dozownikiem. Nie wcierać żelu.
- jeśli to konieczne stosować opatrunek. Za każdym razem stosować nowy opatrunek.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ⚠

Nie używać w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników. W bardzo rzadkich przypadkach zgłaszano wystąpienie podrażnienia skóry. W przypadku wystąpienia podrażnienia lub reakcji alergicznej należy natychmiast przerwać stosowanie.

Help4Skin Gojenie oparzeń nie należy stosować na duże otarcia (większe niż 20 cm²).

Help4Skin Gojenie oparzeń może być stosowany na powierzchniowe oparzenia naskórka i/lub skóry właściwej, zwykle charakteryzujące się obrzękiem, zaczerwienioną skórą i pęcherzami. Nie stosować **Help4Skin Gojenie oparzeń** na twarz, oczy, powieki oraz błony śluzowe.

Należy zawsze zasięgnąć porady lekarza:

- w przypadku dużych, obszernych lub bardzo głębokich ran,
- w przypadku małych, silnie zakażonych ran,
- w przypadku wolnego gojenia się rany lub ryzyka powikłań.

W takich przypadkach **Help4Skin Gojenie oparzeń** może być pomocny, ale nie zastępuje innych, zaleconych przez lekarza lub farmaceutę preparatów, np. leków. Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności (podanego na opakowaniu).

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze między 5°C a 25°C. Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ostatnia modyfikacja treści informacyjnej: marzec 2019.

75 g e



WYTWÓRCA
OYSTERSHELL NV
NIJVERHEIDSWEG 10
9820 MERELBEKE BELGIA

DYSTRYBUTOR

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
83-200 Starogard Gdański
ul. Pelplińska 19
Polska

CE 1639

OPIS SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA OPAKOWANIU:



Limit temperatury



Należy zapoznać się z instrukcją użycia



Uwaga



Numer serii



Data przydatności



Wytwórca

1574/620152/19C/07020510/2